

MALTA

Ganzkörper-Lagerungs- und Positionierungshilfen Mobilisierungshilfe für Behinderte STABILISIERUNGSEFFEKT (siehe 2. Seite)

Eine preiswerte Alternative zur Abrechnungsposition Nr. 20.29.98.0001:

Wegen der Vielzahl von Lagerungsmöglichkeiten mit diesem Hilfsmittel, erübrigt sich in vielen Fällen eine durch Schaumstoffausfräsung anzufertigende, individuell am Körper anpassbare Lagerungshilfe, oder ein Vakuumkissen.

Allgemeine Hinweise:

Die Lagerungshilfen MALTA und KRETA sind Hilfsmittel zur unterstützenden Positionierung und Ganzkörperlagerung Behinderter. Sie ermöglichen überraschend gute Sitz- und Liegepositionen trotz erheblicher behinderungsbedingter Einschränkungen wo es sonst mit hohen Kosten und deutlich höherem Aufwand verbunden wäre.

Diese Lagerungsinseln mobilisieren und fördern Bewegung in Therapie und Alltag. Sie unterstützen Aktivitäten aus sicherem Halt, u.a. Übungen zur Verbesserung der Kopfkontrolle, Anbahnung von Handstützfunktion, Übungen zur basalen Stimulation und Stimulation des Tastsinns. Durch die vielseitigen Lagerungsmöglichkeiten werden außerdem Kreislauf, Atmung und Verdauung angeregt und das allgemeine Wohlbefinden gesteigert.

Deutliche Abweichungen gibt es jedoch im speziellen Einsatz von Malta und Kreta-Lagerungsinseln, so dass es je nach Art und Schwere der Behinderung erforderlich ist, eine spezielle Auswahl zu treffen. Dies soll auf diesen Seiten zur Unterscheidung dargestellt werden, so dass eine Entscheidung zwischen MALTA und KRETA-Lagerungsinseln erleichtert wird. Sollten Sie weitere Fragen dazu haben, stehen wir Ihnen gerne auch persönlich beratend unter der Tel.-Nr. 06721/ 42646 zur Verfügung.



MALTA

Alle Lagerungshilfen sind leicht nachfüllbar.
Polypropylenperlen laden sich nicht statisch auf.

Klang und Vibrations-Übertragung auf den Körper

MALTA- und KRETA-Lagerungsinseln können während der Lagerung wegen der Möglichkeit der Übertragung von Vibrationen sehr erfolgreich für die basale Stimulation, Musiktherapie, Logopädie und Gehörlosenförderung eingesetzt werden. Die luftgepolsterten Polypropylenperlen leiten während der Lagerung über die gespannte PhysioTex-Außenhülle jede Vibration eines unter- an- oder aufgelegten Klang- bzw. Vibrationskörpers (Lautsprecher, Massagegerät, Klangschale, Wasserbett etc.) weiter. -Trommel- bzw. Wasserbett-Effekt.



Außenhülle aus

PhysioTex

(Microfaser beschichtetes
Polyamid-Gewebe)

siehe auch > MATERIALIEN

Voraussetzung des Stabilisierungs-Effektes:

Serienmäßig bestehen die Außenhülle aus PhysioTex mit kurzem Reißverschluss und die Innenhülle aus Baumwolle. Um den Stabilisierungs-Effekt (Unterdruck) zu erreichen muss entweder die Außen- oder die Innenhülle in PhysioTex ausgeführt sein. Ausführung Innenhülle PhysioTex und Außenhülle Baumwolle, abnehmbar, ohne Mehrpreis
Bei Bestellung bitte angeben:
Farbe für die großen Flächen zuerst nennen, danach Farbe für den Rand.

Wir senden Ihnen gerne Stoffmuster zu.



MALTA

MALTA Standardmaß Ø 130 cm 27 cm H Nr. 6595
 Ø 150 cm* 27 cm H Nr. 6594

MALTA-Lagerungsinseln
ab Ø 150 cm zzgl. 7 % Frachtkostenanteil

Hinweise Stabilisierungseffekt

Durch **Stabilisierungs-Effekt** selbstwirkend unterdruckformstabil ca. 20 Sekunden nach der Anformungsphase. Schall- und vibrationsleitend.

Bedienungshinweis zur wirkungsvollen Anwendung des **Stabilisierungs-Effektes**: Die Lagerungshilfen MALTA und KRETA stabilisieren 15-20 Sekunden nach einer eingenommenen Position die entsprechende Haltung durch einen deutlich spürbaren Unterdruck. Dazu ist es erforderlich, dass die eingenommene Position in den ersten 15 bis 20 Sekunden unbedingt beibehalten wird, entweder selbst aktiv oder mittels Unterstützung durch Betreuer. Vor jedem Einsatz wird zunächst evtl. vorhandener Unterdruck durch Aufschütteln der Lagerungshilfe beseitigt. Bei Einnahme der Positionierung auf gute Volumenverteilung und symmetrischen Aufbau achten.

Hinweise Verordnungsfähigkeit

** Begründung zur Verordnungsfähigkeit:

Im Sinne § 33 ff. Sozialgesetzbuch können unsere Lagerungsinseln (MALTA, KRETA; Funktionskissen und -keilkissen bei sehr jungen Patienten) bei vorliegender Indikation gegenüber anderen, teureren Lagerungshilfsmitteln eine akzeptable Versorgung darstellen, da sie ausreichend, zweckmäßig und wirtschaftlich sind. Sie können zur Versorgung herangezogen werden, obwohl keine spezielle Hilfsmittelnnummer vorliegt. In diesen Fall stellen sie u.a. eine preiswerte Alternative zur Abrechnungsposition Nr. 20.29.98.0001 dar. (Abrechnungsposition für individuell am Körper anpassbare Lagerungshilfen) Das Bundessozialgericht erklärt in einer anderen Sache gemäß Urteil vom 3.8.2006, dass die Versorgung mit einem Hilfsmittel nicht von einer Listung im Hilfsmittelverzeichnis abhängig gemacht werden kann (Az: B 3 KR 25/05 R). (www.carehelix.de/ekommentar/urteile/060803_2505.pdf)

Enste PhysioForm Reha

Jakob-Ebersmann-Straße 7

55411 Bingen/Rhein

Telefon +49(0)6721 - 4 2646

Fax +49(0)6721 - 4 48 45

Mobilfunk +49(0)179 - 9 47 18 08

eMail info@enste-reha.de