

Enste PhysioForm Reha GmbH

Saarlandstraße 91

55411 Bingen

Tel. 06721 42646, Fax 06721 44845 Mail

info@enste-reha.de . www.enste-reha.de

Bedienungsanleitung für wiederverwendbare Schutzkittel mit Kapuze

(Stand 03/2020)



Sehr geehrter Kunde,

wir bedanken uns für das uns entgegengebrachte Vertrauen, welches Sie uns durch den Kauf unserer wiederverwendbaren Schutzkittel entgegenbringen.

Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme des Produktes die Gebrauchs- und Sicherheitshinweise aufmerksam durch. Technische Änderungen bleiben vorbehalten. Stellen Sie bitte sicher, dass die Gebrauchsanleitung bei dem Produkt verbleibt.

Wichtige Hinweise:

Bitte beachten Sie:

!! Unsere Schutzkittel sind weder medizinisch noch anderweitig geprüft !!

Wozu unsere Schutzkittel eingesetzt werden:

Diese Schutzkittel können verhindern, dass Sie oder Ihre Kleidung vor unkontrolliertem Tröpfchen-Flug beim Sprechen, Husten oder Niesen, oder durch Berührungen Ihres Gegenübers geschützt sind.

Die Veröffentlichung des Robert-Koch-Instituts vom 23.03.2020 bzgl. einfacher Schutzmasken („...Schutzmasken können ausdrücklich keine Infektion verhindern, sie dienen lediglich dazu Tröpfchenflug zu erschweren!“) kann man u.E. auch auf diese Art der Schutzkleidung beziehen.

Enste PhysioForm Reha GmbH übernimmt diesbezüglich keine Produkthaftung!

Sicherheitshinweise:

Achten Sie darauf, dass die Schutzkittel während der Anwendung unversehrt ist.

Produkt-Eigenschaften, Anwendung, Materialbeschaffenheit, Garantie:

Wozu und in welchem Zusammenhang unsere Schutzkittel eingesetzt werden.

Auf Grund der Vielzahl von Übertragungsmöglichkeiten diverser Erkrankungen können unsere Schutzkittel zum Eigenschutz oder zu Schutz anderer Personen im Umfeld verwendet werden indem sie unkontrollierten Tröpfchen-Flug beim Sprechen, Husten oder Niesen erschweren und somit die Ansteckungsgefahr verringern.

Materialbeschaffenheit:

Unsere Schutzkittel sind wiederverwendbar, da sie in der Waschmaschine bis zu 95 Grad gewaschen werden können.

Sie sind für den Wäschetrockner geeignet.

Sie bestehen aus PhysioTex, einem Polyamid-beschichtetem Gewebe, welches schon seit langem bei medizinischen Produkten eingesetzt wird.

Vor allem ist die Waschbarkeit bis 95 Grad hervorzuheben. Außerdem Trockner geeignet bei niedriger Temperaturstufe.

Weitere Eigenschaften von PhysioTex: Antibakteriell ausgestattet; hautfreundlich da atmungsaktiv (wasserdampfdurchlässig; desinfizierbar mit üblichen Desinfektionsmitteln; allergendicht (Schutz vor Milben und Milbenkot); keine statische Aufladung; geruchsneutral; lichtecht; fammhemmend ausgerüstet (BS 7175, EN 597).

Unsachgemäßer Gebrauch:

Beachten Sie, dass unsere Schutzkittel keinen Infektionsschutz gewährleisten. Wenden Sie sie daher nur im Rahmen der von uns empfohlenen o.a. Anwendungen an.

Garantieumfang:

1. Produkt-Mängel sind spätestens innerhalb einer Woche schriftlich anzuzeigen, sonst gilt die Ware als angenommen. Die Wochenfrist beginnt mit Empfang der Ware.
2. Transportschäden/Schadensmeldungen sind uns und dem Spediteur (vom Fahrer schriftlich bestätigt) sofort zu melden.
3. Wir übernehmen ansonsten keine Produkthaftung.
3. Durch Änderungen- oder Instandsetzungsarbeiten, die der Auftraggeber oder ein Dritter ohne unsere vorherige schriftliche Genehmigung vornimmt, wird die Gewährleistung aufgehoben.
4. Ausgeschlossen aus der Mängelhaftung sind alle einer natürlichen Abnutzung unterworfenen Teile, sowie die Folgen übermäßiger oder unsachgemäßer Beanspruchung.
5. Ein Anspruch auf Wandlung oder Minderung besteht nur, wenn wir die Mängelbeseitigung oder Ersatzlieferung ablehnen oder unzumutbar verzögern.
6. Weitergehende Schadensersatzansprüche des Auftraggebers oder Dritter, insbesondere Schäden, die nicht an dem Liefergegenstand selbst entstanden sind, bestehen nicht.
7. Bei dem Produkt handelt es sich **nicht** um ein eingetragenes Medizinprodukt!

Es ist keine Zertifizierung vorhanden, das Produkt wurde nicht medizinisch oder anderweitig geprüft.

Bedienungsanleitung:**Wirkungsweise:**

Jede neue wiederverwendbare Schutzkittel sollte vor dem ersten Tragen gewaschen werden, damit die Wirkung im Rahmen der angesagten Möglichkeiten gewährleistet ist.

Reinigung:

Unsere Schutzkittel können bis 95 Grad in der Waschmaschine gewaschen werden. Ebenso sind sie auf einer niedrig eingestellten Stufe trocknergeeignet.

Darüber hinaus können Sie mit einem feuchten Tuch abgewischt sowie mit handelsüblichen Desinfektionsmitteln desinfiziert werden.

- Sollten Sie weitere Fragen oder Anmerkungen zur Anwendung oder zum Produkt haben, kontaktieren Sie uns, wir beraten Sie jederzeit gerne, auch telefonisch.

Ihre

Enste PhysioForm Reha GmbH, Saarlandstraße 91, 55411 Bingen

Tel. 06721 42646; Mail. info@enste-reha.de Internet: www.enste-reha.de